



1. После установки матрицы, удалите защитную крышку с кончика унидозы, потянув крышку без скручивания, чтобы предотвратить повреждение унидозы. Поврежденные унидозы следует утилизировать.



2. Вставьте унидозу в наконечник. Для этого могут потребоваться некоторые усилия, так как после каждого использования унидоза должна задвинуть поршень обратно в наконечник.



3. Прилагая умеренное усилие, поверните наконечник по часовой стрелке и установите унидозу.



4. Убедитесь в том, что унидоза закручена до конца и не видна резьба.



5. Выберите скорость подачи материала в нижней части рукоятки. Наиболее высокой скоростью является 5; наиболее медленной - 1. В случае, если вы только начинаете использовать систему SonicFill™ наиболее предпочтителен выбор средней скорости - 3.



6. Разместите наконечник в нижней части полости (например, прилегающую к межзубной матрице). Обратите внимание, что в данном клиническом случае клин был удален для лучшего обзора.



7. Для активации наконечника используйте ножную педаль. Заполните полость при равномерной, непрерывной подаче материала. Держите наконечник ниже поверхности композита, отодвигая его по мере заполнения полости.



8. Надавите на материал со стороны окклюзионной поверхности для того, чтобы убедиться в отсутствии пустот между материалом и зубом. Обработайте край зуба и удалите излишки материала инструментом и смоделируйте реставрацию для восстановления анатомической формы зуба.



9. Выполните отверждение светом окклюзионной поверхности. Для светополимеризации любых оттенков композита лампами с выходной мощностью более 550 мВт/см² достаточно 20 секунд. Снимите межзубную матрицу, если она использовалась.



10. Удалите избыток адгезива и композита при помощи острого скальпеля.

11. Дополнительно полимеризуйте реставрацию по 10 секунд с щечной и лингвальной сторон зуба.



12. Проведите полировку реставрации. Для достижения оптимальных результатов компания Kerr рекомендует использовать резиновый полирующий инструмент, такой как Opti1Step.